




## Dosimètre UVC / Instructions d'usage

Les dosimètres UVsee sont utilisés lors des cycles de désinfection UVC (UV statiques ou lumière pulsée) afin de déterminer visuellement si les surfaces ont reçu un niveau suffisant d'irradiation germicide assurant une réduction d'au moins 99,99% des agents pathogènes présents.

*Avec UVsee, assurez-vous de l'efficacité de votre système de désinfection !*

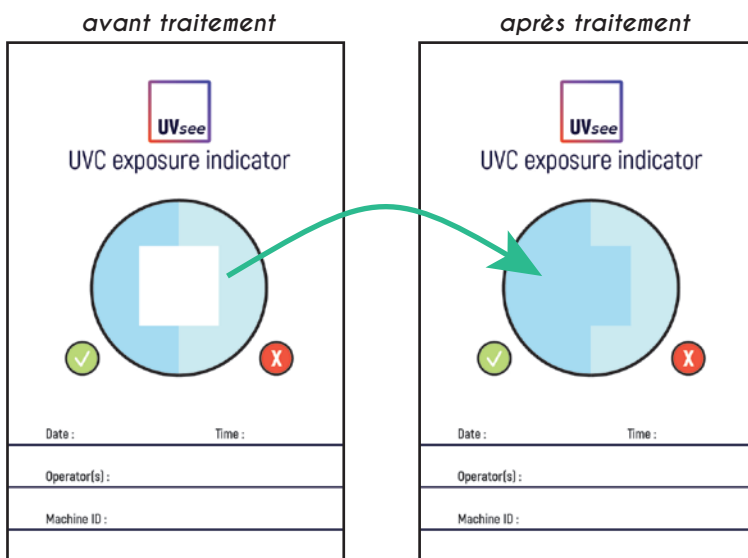

- 1 Disposer la carte face à la source lumineuse UVC
- 2 Lancer un cycle de désinfection en respectant les consignes de sécurité
- 3 Récupérer la carte après la fin du processus de désinfection
- 4 Vérifier le changement de couleur de la partie centrale en la comparant au témoin de traitement.